

Clearblue®

Prueba de embarazo DE RÁPIDA DETECCIÓN

Este empaque contiene 10 pruebas de ovulación en envolturas de color púrpura y blanco y 1 prueba de embarazo en una envoltura de color azul y blanco. Estas instrucciones corresponden a la prueba de embarazo de RÁPIDA DETECCIÓN Clearblue®. Se proporcionan instrucciones por separado para la prueba de ovulación EASY Clearblue®, las cuales deben leerse antes de utilizar el producto.

Clearblue® de rápida detección es una prueba de embarazo rápida y fácil de usar que tiene una precisión superior al 99% cuando se usa a partir del día en que espera que comience su período*.

Lea estas instrucciones con atención antes de realizar una prueba.

Antes de comenzar

Cuando realice la prueba, puede ser útil que tenga a mano un reloj.

1 Cómo realizar la prueba

Si realiza la prueba a partir de la fecha esperada del período, puede realizarla en cualquier momento del día.

Si la realiza antes de esta fecha, utilice la primera orina del día (consulte la **Pregunta 3** para saber cuándo realizar la prueba).

- Cuando esté lista para realizar la prueba, retire la varilla de prueba de la envoltura de aluminio y extraiga la tapa azul.
- Utilice la varilla de prueba de inmediato.

Realice la prueba en el flujo de orina

Puede realizar la prueba directamente en el flujo de orina o en una muestra de orina recolectada en un recipiente limpio y seco.



- Sostenga la punta que cambia de color apuntando hacia abajo en el flujo de orina o en la muestra de orina recolectada, como se indica, durante **5 segundos**.
- La punta que cambia de color se pondrá rosa de inmediato, lo cual significa que la orina está siendo absorbida.



Flujo de orina

Muestra recolectada

- Luego de tomar la muestra, vuelva a colocar la tapa y apoye la varilla de prueba en una superficie plana.

Consulte la **Pregunta 6** en la sección Preguntas y Respuestas si la punta que cambia de color no se pone completamente rosa.


2 3 minutos

ESPERE. A medida que la prueba comience a funcionar, observará que aparecen líneas azules.

3 Cómo leer el resultado después de 3 minutos

Lea el resultado en la ventana de resultado.

- Un resultado de "Embarazada" puede aparecer en 1 minuto si realiza la prueba a partir de la fecha de ausencia del período (es decir, el día posterior a la fecha esperada del período).
- Espere 3 minutos para confirmar un resultado de "No embarazada" o si realiza la prueba antes de la ausencia del período (consulte la **Pregunta 10**).
- Debe haber una línea azul en la ventana de control cuando lea el resultado. Esta línea muestra que la prueba ha funcionado.
- Si no aparece ninguna línea azul en la ventana de control dentro de los primeros **10 minutos**, consulte la **Pregunta 7**.

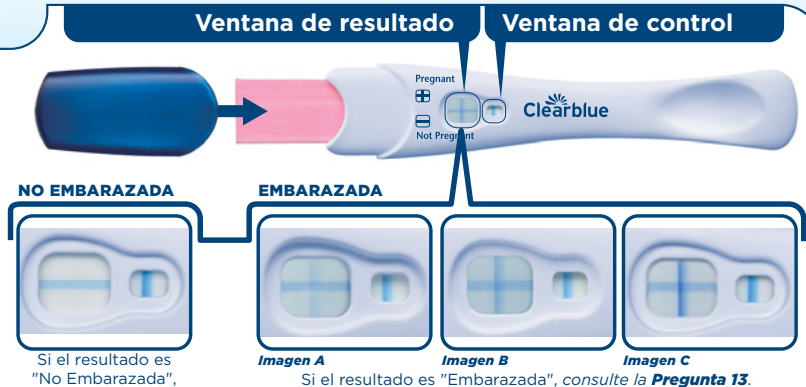

Si el resultado es "No Embarazada", consulte la **Pregunta 12**.

Si el resultado es "Embarazada", consulte la **Pregunta 13**.

No importa si una de las líneas que forman el símbolo "+" es más clara o más oscura que la otra: el resultado es "Embarazada".

¡IMPORTANTE! Lea el resultado dentro de los **10 minutos** de realizada la prueba. Ignore cualquier cambio del resultado que se produzca después de este plazo.

Si aún no está segura del resultado, consulte la **Pregunta 8** para obtener todos los detalles.

Preguntas y Respuestas: Lea la sección que responde las preguntas más frecuentes.

Preguntas y Respuestas

1 ¿Qué nivel de precisión tiene la prueba de embarazo Clearblue® de rápida detección?

Clearblue® de rápida detección tiene una precisión superior al 99% en pruebas de laboratorio cuando se usa a partir de la fecha esperada del período*.

2 ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Clearblue® de rápida detección?

Cuando usted está embarazada, su organismo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG del organismo aumenta en la etapa inicial del embarazo. Clearblue® de rápida detección puede detectar cantidades diminutas de esta hormona en la orina. (La sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml).

3 ¿Cuándo puedo realizar la prueba de embarazo Clearblue® de rápida detección?

Clearblue® de rápida detección puede usarse hasta 4 días antes de la fecha esperada del período. Si usted realiza la prueba antes de la fecha esperada del período y obtiene un resultado de "No embarazada", aún existe la posibilidad de que esté embarazada. Consulte el cuadro que se presenta a continuación para ver los resultados de pruebas clínicas de Clearblue® de rápida detección con muestras de las primeras etapas del embarazo.

Pruebas anticipadas

La hormona del embarazo aumenta rápidamente a comienzos del embarazo, por lo que Clearblue® de rápida detección puede utilizarse para realizar la prueba hasta 4 días antes de la fecha en la que debe tener el período, es decir, 5 días antes de la fecha de ausencia del período. En las pruebas clínicas con muestras de las primeras etapas del embarazo, Clearblue® de rápida detección obtuvo los siguientes resultados:

Cantidad de días antes de la fecha esperada del período	% de muestras de mujeres embarazadas con resultado de "Embarazada"
-1	98%
-2	97%
-3	88%
-4	56%

4 ¿Debo usar una muestra de la primera orina del día?

Si realiza la prueba antes de la fecha esperada del período, use la primera orina del día. De lo contrario, puede hacerlo en cualquier momento del día. Evite beber demasiado líquido antes de realizar la prueba.

5 ¿Puede algún medicamento o enfermedad afectar el resultado?

- Siempre lea las instrucciones del fabricante de los medicamentos que consume antes de realizar una prueba.
- Los medicamentos para la fertilidad que contienen hCG (como Pregnyl® y Profasi®)*** pueden generar resultados engañosos (estos medicamentos para la fertilidad con frecuencia se administran de manera inyectable). Es posible que las pruebas realizadas con Clearblue® de rápida detección poco tiempo después de la administración den un resultado de "Embarazada" falso.
- Otras terapias de fertilidad (como Clomid****), los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deberían afectar el resultado.
- Si dejó de tomar anticonceptivos hormonales recientemente o utiliza terapias de fertilidad, como Clomid****, sus períodos pueden ser irregulares, lo que provocará que realice la prueba con demasiada anticipación.
- Si recientemente ha estado embarazada (incluso si no llegó a término), puede obtener un falso resultado de "Embarazada".
- El embarazo ectópico, los quistes de ovarios, la menopausia y algunas afecciones médicas no comunes pueden producir resultados engañosos.
- Si ha obtenido un resultado de "Embarazada", es posible que posteriormente descubra que no está embarazada debido a la pérdida natural del embarazo que puede ocurrir en las etapas iniciales. Si obtiene resultados inesperados, consulte con su médico.

6 Utilice la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de color no se puso completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Si la punta que cambia de color no se puso completamente rosa, es posible que no haya aplicado una cantidad de orina suficiente. Sin embargo, si la línea azul en la ventana de control aparece dentro de los 10 minutos de realizar la prueba, esto significa que ha funcionado.

7 Utilice la prueba de embarazo, pero no apareció ninguna línea azul en la ventana de control en 10 minutos. ¿Qué debo hacer?

- La prueba no ha funcionado. Esto puede deberse a lo siguiente:
 - La punta que cambia de color no se mantuvo hacia abajo o la varilla de prueba no se colocó en posición horizontal después de aplicar la orina.
 - Se aplicó demasiada orina o muy poca. **La muestra se debe tomar durante 5 segundos.**

Clearblue® de rápida detección está especialmente diseñada para ser utilizada fácilmente en el hogar. No obstante, si tiene preguntas sobre la prueba, llame a la línea de ayuda de Clearblue®. **Línea de asistencia Clearblue®** Agentes disponibles de 08:30 a 17:00 h, lun - vie. Número gratuito. **1-800-321-3279** Gratuito desde un teléfono fijo. Por favor, tenga los números de lote tanto del paquete interno como del externo. Por motivos de control de calidad y capacitación, las llamadas son grabadas. **Visítenos en: www.clearblue.com**

Prueba de embarazo casera.

Solo para uso de diagnóstico in vitro.

Conservar entre 36 °F y 86 °F (de 2 °C a 30 °C).

En caso de que el dispositivo se haya conservado refrigerado, dejar que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba.

No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar si la envoltura que contiene la varilla de prueba está dañada.

No utilizar si la varilla de prueba está vencida.

Utilícela una sola vez.

*Precisión del 99% para detectar la hormona del embarazo. No obstante, algunas embarazadas pueden no tener cantidades detectables de la hormona del embarazo en la orina el primer día de ausencia del período, o es posible que hayan calculado mal el primer día de ausencia del período.

Debe volver a realizar la prueba con una varilla nueva, teniendo cuidado de seguir las instrucciones. Quizás desee recolectar una muestra de orina en un recipiente limpio y seco para, luego, sumergir solamente la punta que cambia de color durante 5 segundos.

8 ¿Qué hago si no estoy segura del resultado?

- Para que el resultado sea "Embarazada", debe haber una línea azul en la ventana de control y un símbolo "+" en la ventana de resultado dentro de los 10 minutos de realizada la prueba.

El aspecto del símbolo "+" en la ventana de resultado puede variar. Sin embargo, las líneas que forman el símbolo "+" y la línea de la ventana de control deben tener un ancho similar (consulte las imágenes A-C en la sección de resultados).

Imagen A

Esto indica un resultado de "Embarazada". Esto es más probable al realizar la prueba antes de la fecha esperada del período, cuando es posible que los niveles de hCG sean relativamente bajos.

Imagen B

Esto no es inusual cuando está embarazada y realiza la prueba en la fecha esperada de su período o cerca de ella, ya que los niveles de hCG aún son relativamente bajos.

Imagen C

Esto es más probable que suceda cuando realiza la prueba unos días después de la fecha esperada del período, ya que los niveles de hCG son más altos.

- Si aún no está segura del resultado, debe esperar al menos 3 días antes de realizar la prueba nuevamente, teniendo cuidado de seguir las instrucciones.

- Para que el resultado sea "No embarazada", debe haber una línea azul en la ventana de control y un símbolo "-" (menos) en la ventana de resultado dentro de los 10 minutos de realizada la prueba. Si el resultado es "No embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, consulte la Pregunto 12.

9 ¿Qué podría afectar la precisión del resultado?

Si realiza la prueba antes de la fecha esperada del período, la precisión de Clearblue® de rápida detección será más baja. Si no toma una muestra de orina durante la cantidad de tiempo correcta, es posible que no obtenga un resultado confiable. Sin embargo, siempre que observe una línea azul en la ventana de control dentro de los 10 minutos de realizada la prueba, puede confiar en el resultado. Si obtiene resultados inesperados de forma repetida, consulte con su médico. También, consulte la Pregunto 5.

10 ¿Cuándo puedo leer el resultado?

Un resultado de "Embarazada" puede aparecer en 1 minuto si realiza la prueba a partir de la fecha de ausencia del período (es decir, el día posterior a la fecha esperada del período). También, asegúrese de que haya una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado. Debe esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No embarazada" o si realiza la prueba antes de la ausencia del período.

11 ¿Cuánto tiempo durará el resultado?

El resultado se puede leer en cualquier momento entre los 3 y 10 minutos de realizada la prueba. Después de transcurridos 10 minutos, cualquier cambio que se produzca en el resultado no debe ser tenido en cuenta.

12 La prueba indicó "No embarazada". ¿Qué debo hacer?

Es posible que no esté embarazada, que el nivel de la hormona del embarazo todavía no sea lo suficientemente alto como para detectarse o que haya calculado mal la fecha esperada del período.

- Si realizó la prueba con anticipación, vuelva a realizarla en la fecha en que debe tener el período.
- Si tiene un atraso, espere 3 días antes de realizarse la prueba nuevamente. Si esta prueba le da un resultado de "No embarazada" y aún no ha tenido su período, consulte con su médico.

13 La prueba indicó "Embarazada". ¿Qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada, debe consultar a su médico, quien le aconsejará sobre los próximos pasos que debe seguir.

14 He estado tratando de quedar embarazada, pero aún no he podido. ¿Hay algo que pueda hacer?

Se encuentra en su etapa más fértil y, por lo tanto, tiene más probabilidades de quedar embarazada durante el día de la ovulación (cuando uno de los ovarios libera un óvulo) y los días anteriores a esta. La prueba de ovulación Clearblue® Easy es una varilla de prueba de un solo paso que predice la ovulación identificando los cambios en sus niveles de hormonas. La prueba de ovulación Clearblue® Easy es tan simple de usar como la prueba de embarazo Clearblue® de rápida detección. El monitor de fertilidad Clearblue® es el método más avanzado para maximizar sus probabilidades de concebir. El monitor muestra inequívocamente su nivel de fertilidad todos los días e identifica, con más precisión, más días fértiles que cualquier otro método. Para obtener más información, llame a la línea de ayuda de Clearblue®.

Distribuido por Procter & Gamble, Cincinnati, OH 45202.

Fabricado para: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra, Suiza.

Clearblue® es una marca comercial de SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD).

© 2018 SPD. Todos los derechos reservados.

Pat. - ver www.swissprecisiondiagnostics.com/patents

**Pregnyl® es una marca comercial registrada de Organon USA Inc.

Profasi® es una marca comercial registrada de Ares Trading S.A.

***Clomid® es una marca comercial registrada de Merrell Pharmaceuticals Inc.

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos recomiendan a las mujeres embarazadas que se abstengan del consumo de alcohol, ya que esto puede ocasionar efectos dañinos en el bebé, tales como trastornos del síndrome de alcoholismo fetal (FASD). Puede encontrar más información en www.surgeongeneral.gov.